

Instruções de uso

Cânula para Cistoscopia

Registro/Notificação ANVISA n°: 83058639005

Introdução: As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis, nem tem a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos.

Indicação de Uso: A Cânula de Cistoscopia é utilizada para injeção cistoscopia na uretra, colo da bexiga e parede da bexiga, de um agente de volume para tratamento de doença uretral.

Princípio de funcionamento: A Cânula de Cistoscopia tem o princípio de funcionamento injetar soluções na uretra, colo e parede de bexiga para tratamentos de doenças uretrais.

Modo de Uso do Produto:

1. Retire a cânula da embalagem estéril
2. Se estiver utilizando um cistoscópio rígido, coloque a cânula de injeção para que não danifique o canal de trabalho;
3. Se for utilizar o cistoscópio flexível, certifique-se de que o cistoscópio está na posição neutra (não torcido) para evitar danos ao canal de trabalho;
4. Mova o cistoscópio para a área de aplicação;
5. Conecte as peças luer lock da seringa a cânula de injeção e inicie a injeção;
6. Após o término da operação, desconecte a seringa do luer lock;
7. Remova a cânula de injeção.

Advertências e Precauções: - A Cânula para Cistoscopia deve ser utilizada somente por profissionais médicos treinados com experiência em possíveis efeitos colaterais, em indicação e contra indicações em injeções cistoscópias no hospital.
- Em pacientes que apresentem irregularidades hemorrágicas ou que utilizarem medicação anticoagulante, o médico deverá tomar a decisão de qual cânula utilizar.
- Segure a cânula de forma que as lesões acidentais, perfurações ou rasgos sejam impedidos.

- É necessário o manuseio lento e cuidadoso para evitar os perigos que podem ser causados pela aplicação de uma potência excessiva e descontrolada durante a aplicação.
- Possíveis reações alérgicas devem ser levadas em consideração
- Não use o dispositivo sob ressonância magnética
- Não tente limpar ou reesterilizar o produto
- Verifique se a embalagem está íntegra, sem violações. Se a embalagem estiver danificada ou aberta não utilize o produto.
- Verifique a data de validade e o tamanho da cânula. Não use produtos vencidos
- Produto de uso único
- Não deve ser utilizado mais de 24 horas no corpo.

Efeitos adversos: Não se aplica

Apresentação comercial: A Cânula de Cistoscopia está disponível em embalagem primária de Policloreto de Vinila (PVC) mais papel grau cirúrgico contendo 1 unidade do produto. Posteriormente é acondicionada em caixa de papelão (celulose) para transporte.

Método de esterilização: Esterilizado com óxido de etileno

Descarte do produto: A forma de descarte do produto deve seguir o regulamento técnico de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, conforme descrito na resolução RDC N° 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Detentor do registro:

Brazil Regulatory
Rua Fernando de Noronha, 42 Bairro: Santa Rosa
Vinhedo-SP, CEP: 13289-082

Fabricado por:

MATEK MEDIKAL AYGITLAR TEKNOLOJI SAN. VE TIC A.S.
Ivedik OSB Mah. 2273 Cad. No:10 Yenimahalle- Ankara- Turquia.